


Instrucciones de uso
AIMOVIG® (ereenumab-aooe)
Inyección para administración subcutánea
Autoinyector SureClick® monodosis precargado
70 mg/ml

Guía de piezas

Antes del uso

Después del uso

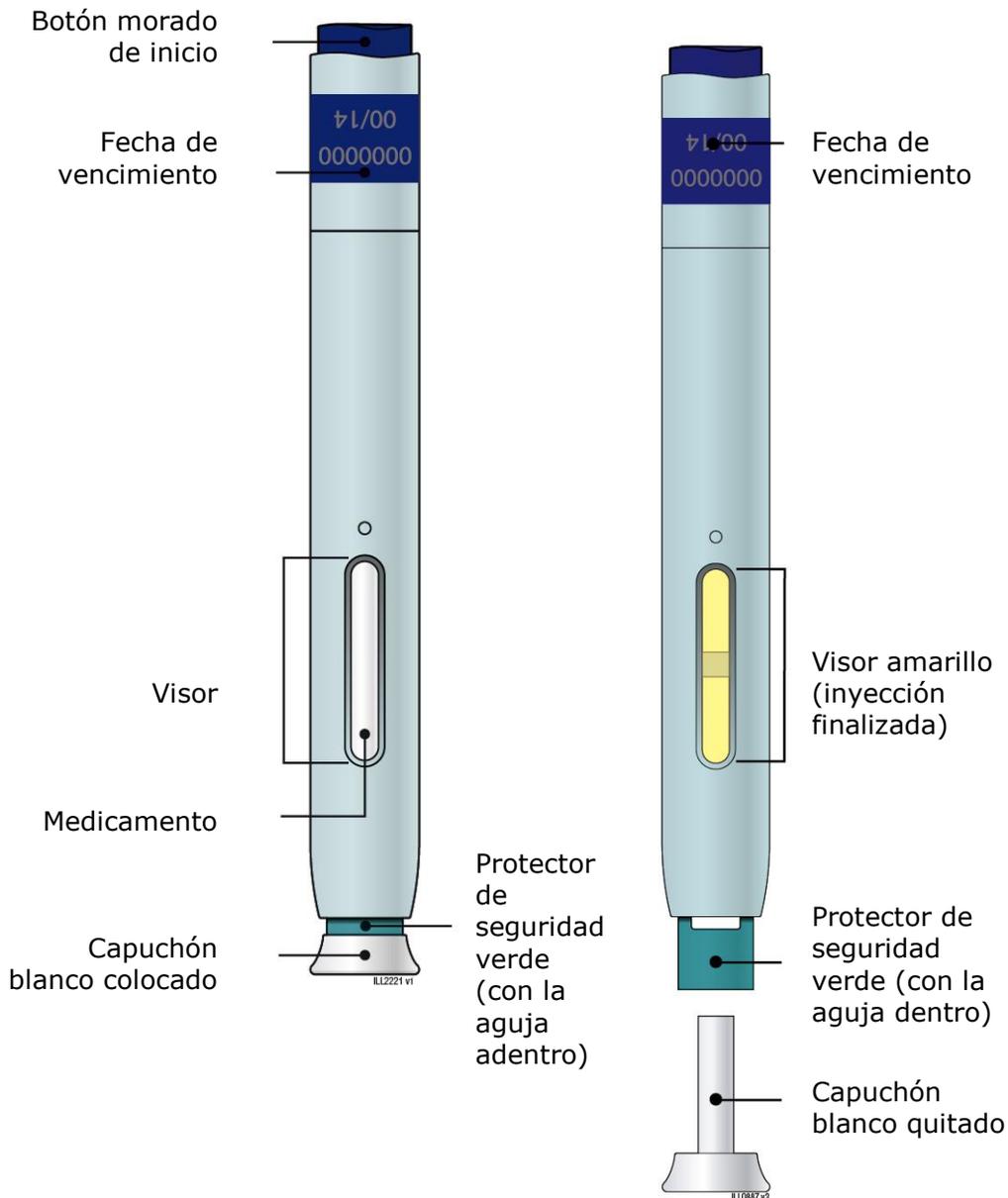

Importante: la aguja está dentro del protector de seguridad verde.

Importante

Antes de usar el autoinyector SureClick de AIMOVIG, lea esta información importante:

Conservación del autoinyector SureClick de AIMOVIG

- Mantenga el autoinyector fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el autoinyector dentro de la caja original para protegerlo de la luz.
- El autoinyector debe conservarse en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C).
- Tras retirarlo del refrigerador, AIMOVIG puede conservarse a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C) durante un máximo de 7 días.
- Deseche AIMOVIG si lo ha dejado a temperatura ambiente más de 7 días.
- **No** lo congele.

Uso del autoinyector SureClick de AIMOVIG

- La cubierta de la aguja que está dentro del capuchón blanco del autoinyector de AIMOVIG contiene caucho natural seco, que está hecho con látex. Dígame al profesional de la salud si es alérgico al látex.
- Es importante que no intente administrar la inyección a menos que usted o su cuidador haya recibido capacitación del profesional de la salud.
- **No** use el autoinyector después de la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.
- **No** agite el autoinyector.
- **No** quite el capuchón blanco del autoinyector hasta que esté listo para administrar la inyección.
- **No** congele el autoinyector y no lo utilice si estuvo congelado.
- **No** use el autoinyector si se ha caído sobre una superficie dura. Parte del autoinyector puede haberse roto, aunque no se vea. Use otro autoinyector y llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436).

Paso 1: disponga

AIMOVIG viene en forma de autoinyector monodosis (1 sola dosis) precargado. El profesional de la salud le recetará la dosis que usted necesita.

Antes de aplicar la inyección, lea siempre la etiqueta del autoinyector monodosis precargado para asegurarse de que tiene el medicamento correcto y la dosis correcta de AIMOVIG.

A Retire el autoinyector de la caja.


Levante con cuidado hacia arriba el autoinyector para retirarlo de la caja.

Deje el autoinyector a temperatura ambiente durante al menos **30** minutos antes de inyectar.

- **No** vuelva a guardar el autoinyector en el refrigerador una vez que haya alcanzado la temperatura ambiente.
- **No** intente calentar el autoinyector usando una fuente de calor tal como agua caliente o el horno de microondas.
- **No** deje el autoinyector expuesto a la luz del sol directa.
- **No** agite el autoinyector.
- **No** quite todavía el capuchón blanco del autoinyector.

B Inspeccione el autoinyector.

Protector de seguridad verde (con la aguja dentro)

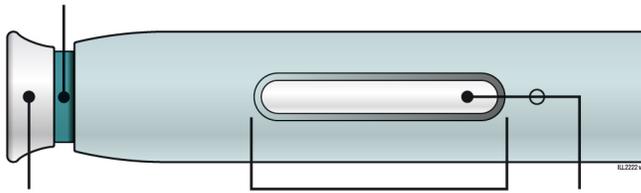

Capuchón
blanco colocado

Visor

Medicamento

Asegúrese de que el medicamento que ve por el visor sea transparente y de incoloro a amarillo muy claro.

- **No** use el autoinyector si el medicamento está turbio o ha cambiado de color, o si contiene escamas o partículas.
- **No** use el autoinyector si alguna de las piezas se ve agrietada o rota.
- **No** use el autoinyector si se ha caído.
- **No** use el autoinyector si el capuchón blanco falta o no está bien sujetado.
- **No** use el autoinyector en una fecha posterior a la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

En todos los casos, use otro autoinyector y llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436).

C Reúna todos los materiales necesarios para la inyección.

Lávese bien las manos con agua y jabón.

En una superficie limpia y bien iluminada coloque:

- un autoinyector sin usar
- toallitas con alcohol
- bolas de algodón o trozos de gasa
- apósitos adhesivos
- recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes (consulte el "paso 4: termine")




D Prepare y limpie el lugar de inyección.

Puede inyectar en:

- el muslo
- la zona del estómago (abdomen), salvo la zona de **dos** pulgadas alrededor del ombligo
- la zona externa de la parte superior del brazo (únicamente si otra persona le va a administrar la inyección)


Limpie el lugar de inyección con una toallita con alcohol. Deje que la piel se seque.

- **No** vuelva a tocar esta zona antes de inyectar.
- **No** inyecte en zonas donde la piel esté sensible, roja, dura o amoratada.
- Evite inyectar directamente sobre la piel estriada, con cicatrices, o con manchas o lesiones elevadas, gruesas, rojas o descamadas.

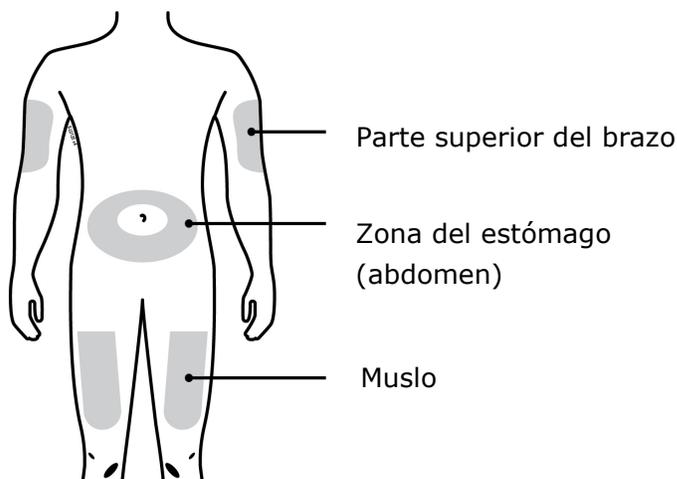

Paso 2: prepárese

E Tire del capuchón blanco en línea recta y quítelo únicamente cuando esté preparado para inyectar. **No** deje el autoinyector sin el capuchón blanco durante más de **cinco minutos**. El medicamento puede secarse.

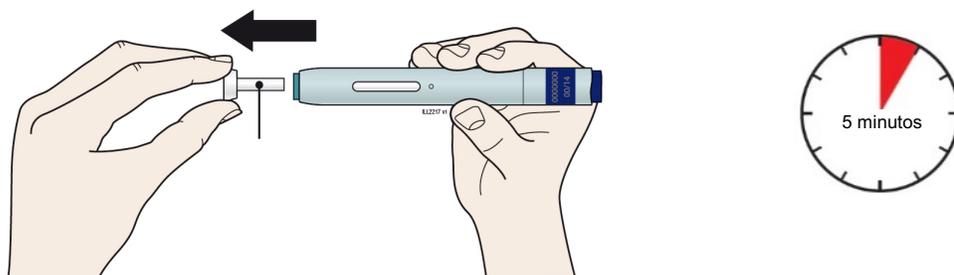


Capuchón blanco

Es normal ver una gota de líquido en el extremo de la aguja o en el protector de seguridad verde.

- **No** gire ni doble el capuchón blanco.
- **No** vuelva a poner el capuchón blanco en el autoinyector.
- **No** ponga los dedos dentro del protector de seguridad verde.
- **No** quite el capuchón blanco del autoinyector hasta que esté preparado para inyectar.

F Cree una superficie firme en el lugar que haya seleccionado para la inyección (muslo, estómago o zonas externas de la parte superior del brazo). Para hacerlo, aplique **ya sea** el método de estiramiento **o** el método del pellizco.


Estiramiento

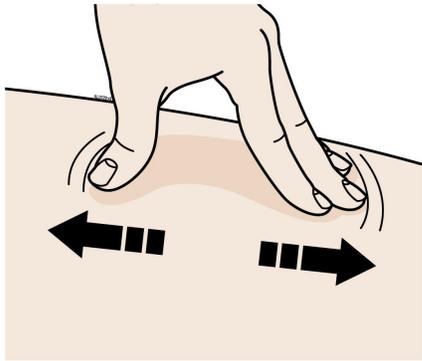

Estire la piel con firmeza moviendo el pulgar y los dedos en direcciones opuestas para crear una zona de aproximadamente **dos** pulgadas de ancho.



Pellizco

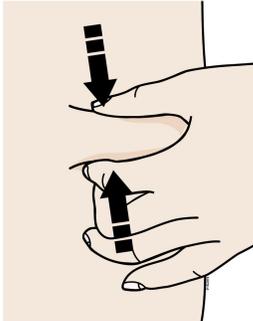


Pellizque la piel con firmeza entre el pulgar y los dedos para crear una zona de aproximadamente **dos** pulgadas de ancho.

Importante: mantenga la piel estirada o pellizcada mientras inyecta.


Paso 3: inyecte

G Siga manteniendo la piel estirada o pellizcada. Sin el capuchón blanco, **ponga** el protector de seguridad verde sobre la piel de modo que forme un ángulo de 90 grados. La **aguja está dentro** del protector de seguridad verde. No toque todavía el botón morado de inicio.

Protector de seguridad verde (con la aguja dentro)

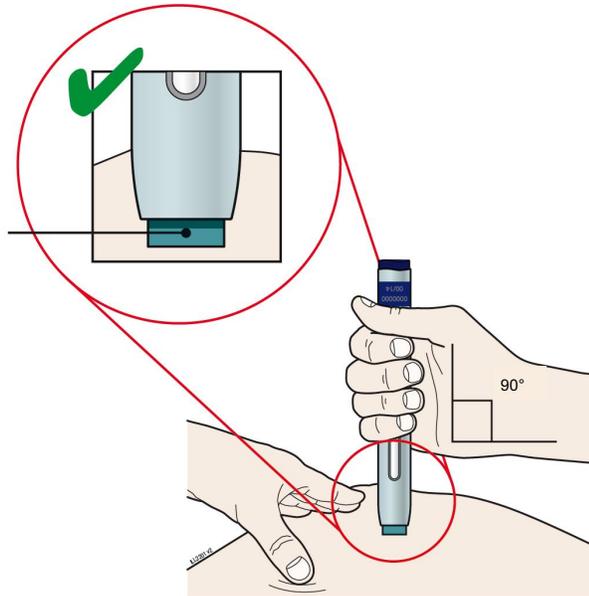


H Empuje firmemente el autoinyector contra la piel hasta que el autoinyector deje de moverse.

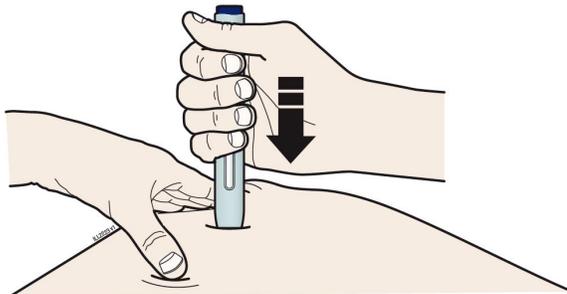


Importante: debe empujar el autoinyector hasta el fondo, pero no toque el botón morado de inicio hasta que esté listo para inyectar.



I Cuando esté listo para inyectar, **pulse** el botón morado de inicio. Escuchará un clic.

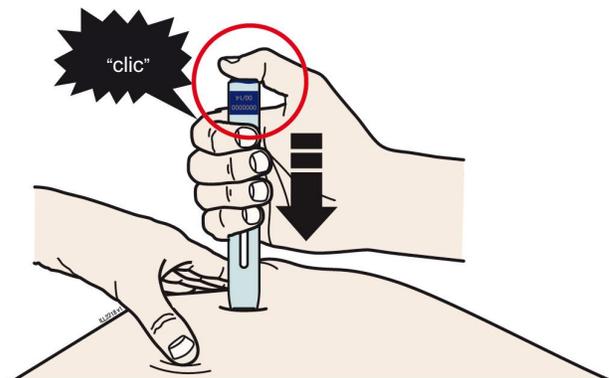


J Continúe **empujando** el autoinyector contra la piel. Luego levante el pulgar mientras sigue sosteniendo el autoinyector contra la piel. La inyección podría tardar unos 15 segundos.

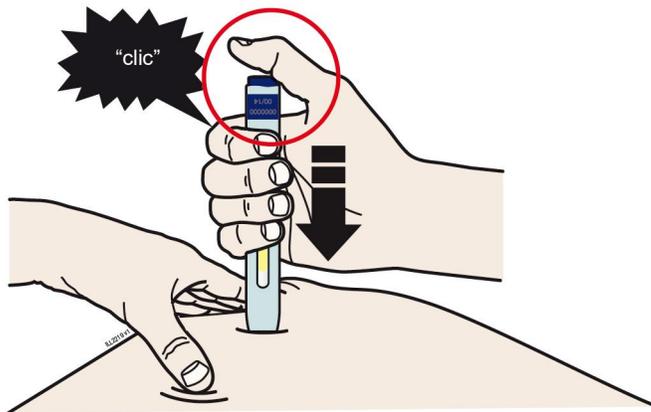

15 segundos

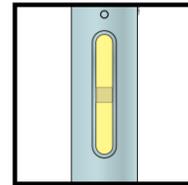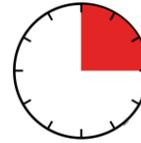

El visor cambiará de transparente a amarillo cuando la inyección haya terminado. Tal vez se escuche un segundo clic.

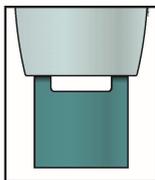


Nota: después de retirar el autoinyector de la piel, la aguja quedará automáticamente cubierta.

Importante: si, cuando retira el autoinyector, el visor no se ha vuelto de color amarillo o si parece que el medicamento sigue inyectándose, quiere decir que no ha recibido la dosis completa. Llame de inmediato al profesional de la salud.

Paso 4: termine

K Deseche el autoinyector usado y el capuchón blanco.

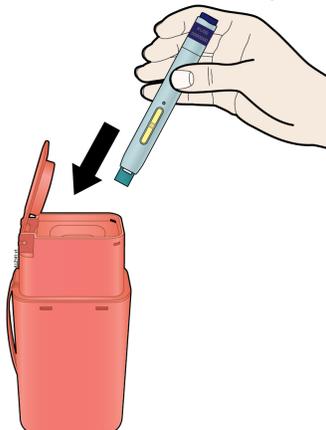

Inmediatamente después del uso, coloque el autoinyector de AIMOVIG usado y el capuchón blanco en un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA. **No** tire (deseche) el autoinyector SureClick con la basura doméstica.

Si no tiene un recipiente para la eliminación de objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que:

- sea de plástico resistente
- pueda cerrarse con una tapa hermética y resistente a las perforaciones que impida la salida de los objetos punzocortantes
- se mantenga en posición vertical y estable durante el uso
- sea resistente a las fugas
- esté debidamente etiquetado para advertir de que contiene desechos peligrosos

Cuando el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, tendrá que seguir las pautas de su comunidad para desechar correctamente el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes. Puede haber leyes estatales o locales sobre cómo desechar las agujas y jeringas usadas. Para ver más información sobre el desecho seguro de objetos punzocortantes y para consultar información específica sobre el desecho de objetos punzocortantes en su estado, visite el sitio web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>

- **No** reutilice el autoinyector.
- **No** recicle el autoinyector ni el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes ni los deseche con la basura doméstica.

Importante: mantenga siempre el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes fuera del alcance de los niños.

L Examine el lugar de inyección.

Si hay sangre, presione una bola de algodón o un trozo de gasa sobre el lugar de inyección. **No** frote el lugar de inyección. Si es necesario, aplique un apósito adhesivo.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrirá si pulso el botón morado de inicio antes de estar listo para inyectar sobre la piel?

Aunque pulse el botón morado de inicio, la inyección comenzará únicamente cuando el protector de seguridad verde también esté pulsado y dentro del autoinyector.

¿Puedo mover el autoinyector sobre la piel mientras elijo un lugar de inyección?

Puede mover el autoinyector sobre la piel por el lugar de inyección siempre y cuando **no** pulse el botón morado de inicio. Si pulsa el botón morado de inicio y el protector de seguridad verde está ya dentro del autoinyector, comenzará la inyección.

¿Puedo soltar el botón morado de inicio una vez que comienza la inyección?

Puede soltar el botón morado de inicio, pero siga sosteniendo el autoinyector firmemente contra la piel durante la inyección.

¿El botón morado de inicio volverá a salir una vez que retire el pulgar?

Es posible que el botón morado de inicio no vuelva a salir una vez que retire el pulgar si lo mantuvo presionado durante la inyección. Esto es normal.

¿Qué debo hacer si no escucho el clic después de mantener empujado el dispositivo sobre la piel durante 15 segundos?

Si no escuchó el clic, para confirmar si la inyección finalizó, compruebe si el visor se ha vuelto de color amarillo.

¿A quién debo llamar si necesito ayuda con el autoinyector o la inyección?

Si necesita más información o ayuda, visite www.aimovig.com o llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436).

Estas Instrucciones de uso fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.



AIMOVIG® (erenumab-aooe)

Fabricado por:
Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799 EE. UU.
Número de licencia en EE. UU.: 1080

© 2018-2021 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.

<partnumber> Modificado: 11/2021 v5

Cuadro de símbolos			
			
Este producto tiene caucho natural seco	No reutilizar	PRECAUCIÓN Antes del uso, lea las Instrucciones de uso (adjuntas) para obtener información sobre la administración y consulte en el prospecto la Información completa de prescripción	Número de lote